


## ISTRUZIONI PER L'USO

**RISCHIO DA CUI IL DPI È DESTINATO A PROTEGGERE:** Il dispositivo KARINA ITL4 è una semimaschera filtrante antipolvere di tipo FFP2 NR. È quindi atto alla protezione delle vie respiratorie dell'utilizzatore contro un'atmosfera potenzialmente inquinata. Il Dispositivo è progettato per fornire protezione contro gli aerosol sia solidi che liquidi.

**CONTROLLARE PRIMA DELL'UTILIZZO:** Prima dell'uso, controllare il dispositivo in ogni sua parte per verificare la presenza di buchi, strappi o lesioni. In presenza di eventuali danneggiamenti, **NON UTILIZZARE**. Prenderne uno nuovo.

### ISTRUZIONI D'USO:

1. Impugnare la semimaschera in modo che la parte esterna bombata sia appoggiata al palmo della mano e che gli elastici rimangano sotto la mano.
2. Posizionare la semimaschera sotto il mento con il ferretto stringato in alto.
3. Posizionare gli elastici dietro le orecchie.
4. Modellare il ferretto stringinaso alla conformazione del naso stesso. Verificare la tenuta della semimaschera prima di entrare nell'area di lavoro con la prova di tenuta, ispirando ed espirando profondamente. Se si percepiscono fughe d'aria, riposizionare la semimaschera.

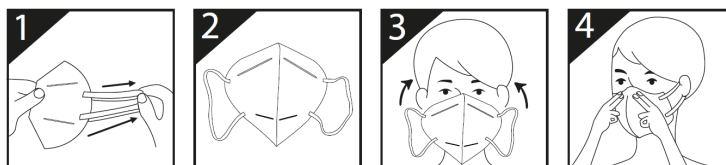

**CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:** Conservare e trasportare le semimaschere non ancora utilizzate all'interno della propria confezione in luogo asciutto (<80%) a temperatura compresa tra -20°C e +40°C. Semimaschera monouso: la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro (8 ore); non riutilizzare. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla confezione. La bardatura del capo ha la medesima data di fabbricazione e di scadenza del dispositivo completo. Non disperdere il dispositivo nell'ambiente dopo l'uso. Smaltire in conformità alle norme di legge locali di gestione dei rifiuti.

**AVVERTENZE:** Controllare l'integrità della semimaschera prima dell'uso. Sostituire la semimaschera immediatamente se si avverte difficoltà respiratoria, se la semimaschera subisce danni, o se sussistono problemi di aderenza al viso. La barba può ridurre l'efficienza della semimaschera. Non utilizzare quando le concentrazioni dei contaminanti sono pericolose per la salute o la vita o in carenza di ossigeno. Non utilizzare in atmosfera dove c'è pericolo di esplosione. Non richiede manutenzione.

### SIGNIFICATO DEI PITTOGRAMMI/SIMBOLI:

| Consultare il manuale di istruzioni   | Temperatura di conservazione  | Tasso massimo di umidità nel luogo di conservazione.                                | Scadenza. aaaa = Anno; mm = Mese  | Indicazione che la semimaschera è non riutilizzabile | Marcatura CE con numero 2008 identificativo dell'Organismo Notificato DOLOMITICERT Scarl |
|---|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  | <b>NR</b>  | <b>CE 2008</b>   |

**RIFERIMENTI NORMATIVI:** La marcatura CE attesta che le semimaschere soddisfano i requisiti essenziali del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Il dispositivo è stato sottoposto alla procedura di certificazione dall'organismo notificato DOLOMITICERT Scarl (Z.I. Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy - Notified body number: 2008) che ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) ed effettua la procedura di valutazione della conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2).

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:** Dichiarazione di conformità scaricabile dal sito [www.realcaresrl.it](http://www.realcaresrl.it)

### PRESTAZIONI REGISTRATE DURANTE LE PROVE TECNICHE

Perdita di tenuta totale verso l'interno: inferiore a 11% per almeno 46 su 50 prove effettuate;  
inferiore a 8% per almeno 8 delle 10 medie aritmetiche relative a ciascun portatore

Penetrazione del materiale filtrante: Prova con aerosol di cloruro di sodio 95 l/min <6%  
Prova con aerosol di olio di paraffina 95 l/min <6%

Tenore di anidride carbonica nell'aria di inspirazione: < 1,0%

Resistenza respiratoria: Inspirazione 30 l/min <0,7mbar  
Inspirazione 95 l/min < 2,4mbar  
Espirazione 160 l/min <3,0mbar

I risultati dei test qualificano il dispositivo come semimaschera filtrante antipolvere di classe FFP2 NR

### FABBRICANTE

REAL CARE S.r.l. - Viale degli Inventori, 6 - 41018 -  
San Cesario sul Panaro (MO) – Tel. +39 392 1567009 -  
Email [info@realcaresrl.it](mailto:info@realcaresrl.it) – Web - [www.realcaresrl.it](http://www.realcaresrl.it)

### DISTRIBUTORE

NERI S.p.A - Via 8 Marzo,6 - 42025  
Corte Tegge di Cavriago (RE) - Tel. 0522948111  
[www.nerispa.com](http://www.nerispa.com)